

QUIXX® daily

Burun temizliği ve nemlendirilmesi için izotonik deniz suyu (%0,9 yoğunluğunda NaCl) içeren aerosol sprey

QUIXX® daily; sinüzit, tıkalı burun, saman nezlesi ve alerji ile ilişkili burun tıkanıklığının giderilmesine yardımcı olan ve ameliyat sonrası burun bakım ve sağlığına yönelik ilaç içermeyen, steril ve renksiz bir burun yıkama spreyidir. İçerisindeki tuz (%0,9 NaCl) konsantrasyonu doğal vücut seviyesine ayarlanmıştır ve bu sayede buruna nazikçe uygulanır ve burun mukozasını kurutmaz, değiştirmez veya burun mukozasına hasar vermez.

QUIXX® daily : doğal deniz suyu içermektedir (saf su ile vücut seviyesine (%0,9 NaCl) seyreltilmiştir).

QUIXX® daily solunumunuzu nasıl kolaylaştırır?

- Nezle ve alerji gibi durumlarda, mukusu sıvılaştırarak burun salgılarının atılmasını sağlar.
- Akut üst solunum yolu enfeksiyonlarının (ÜSYE) yanı sıra akut ve kronik rinosinüzitin lokal semptomlarını hafifletir.
- Bakteri, virüs, alerjen, polen, kabuk, kir ve mukus fazlasını gidermek için burnu yoğun bir şekilde yıkar.
- Nemlendirme ve tahrişi rahatlama etkisi vardır.

QUIXX daily'nin şu avantajları da vardır:

- İlaç içermeyen formülasyona sahiptir, bağımlılığa sebep olmaz, uzun süre kullanılabilir.
- Tüp, sızdırma yapmaksızın yatay olarak saklanabilir.
- Son damlasına kadar kullanılabilir, tüpte kullanılmayan ürün kalmaz.
- Herhangi bir yanma riski olan itici madde içermez, sterildir, koruyucu madde içermez.

QUIXX® daily'yi kimler kullanabilir?

Yeni doğanlar da dahil olmak üzere bebek, çocuk, yetişkinler.

QUIXX® daily gebelik ve emzirme sırasında da kullanılabilir.

QUIXX® daily nasıl kullanılır?

QUIXX® daily'yi kullanırken daima bu kullanım kılavuzuna uygun şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ürünün aşağıdaki şekilde kullanılması önerilir:

QUIXX® daily, kuru ve tahriş olmuş solunum yolu probleminiz devam ettiği sürece, günde 5 defaya kadar uygulanır.

1. Burnunuzu temizleyiniz.



2. Tüpün kapağını açınız. Tüpü herhangi bir açıda tutarak başlığı burun deliğine nazikçe yerleştiriniz. Başınızı, yıkamak istediğiniz burun deliğinin tersi yönünde hafifçe eğiniz.



3. Ürünün başındaki püskürtücüye 1-2 saniye basın. Bir burun deliğinden sonra diğerine sprey uygulayın.



4. Her kullanımdan sonra püskürtücü başlığı yıkayıp kurutunuz ve kapağı tekrar kapatınız. Bu işlemler sırasında lavabo veya genişçe bir kap kullanmanız önerilir.



Küçük çocuklar için;

Bebeği sabit pozisyonda sırt üstü yatırın
Bebeğin başını bir tarafa çevirin, üstteki burun deliğine tübün başlığını nazikçe yerleştirin. Püskürtücüye kısaca basın, bebeğin başını diğer tarafa çevirerek diğer burun deliği için tekrarlayın.

Kağıt mendil ile silin

Tübün başlığını sabunlu su ile yıkayın, durulayın ve kurutun

6 aydan itibaren çocuklar için;

Tüpü herhangi bir açıda tutun ve başlığını her bir burun deliğine nazikçe yerleştirin ve 1-2 saniye basın.

Hem hijyeni sağlamak hem de kullanıcılar arasındaki çapraz bulaşmadan kaçınmak için, ürün yalnızca bir kişi tarafından kullanılmalıdır.

Kontrendikasyon

Ürünün içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılık.

Uyarı

Basıncılı tüp: Isındığında patlayabilir.

- Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açık ateşlerden ve diğer ateşleme kaynaklarından uzak tutun. Sigara içmek yasaktır.
- Kullandıktan sonra dahi delmeyin veya yakmayın.
- Güneş ışığından koruyun.
- 50°C/122°F üstündeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Önlemler

- Bu cihazın birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması, enfeksiyonların yayılmasına neden olabilir, püskürtücü başlığı her kullanımdan sonra sabunlu su ile yıkayınız ve sıcak su ile durulayınız.
- 6 ayın altındaki çocuklarda kullanım için ciddi endikasyon olmalı ve çocuklar gözetim altında olmalıdır.
- Bebeğin başını asla geriye yatırmayınız, böylece salgılar boğazına akmayacaktır.

Raf ömrü

36 ay.

Bu ürün, açıldıktan sonra 12 ay içinde kullanılmalıdır. Ambalajın özel basınçlı püskürtme (bag on valve actuator) sistemi teknolojisi sayesinde, çözelti son damlasına kadar steril kalır. Son kullanma tarihi geçmiş ürünü kullanmayınız.

Saklama koşulları

15°C-30°C arasında saklayınız.

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerde saklayınız!

Ambalaj boyutu

100 ml

İthalatçı

Menarini İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Maslak Mah. Sümer Sok. No:4 Maslak Office Building (MOB)
Kat: 7-8 34485 Maslak, Sarıyer/İstanbul



Üretim Yeri

AURENA LABORATORIES AB
Fjärrviksvägen 22, 65350 Karlstad, İsveç



0413

Revizyon tarihi

04/02/2020



Vers: 2020-02-04



Tüpün/kutunun altına bakınız.

Quixx® daily

V-No.:		TW-No.:	73030/73032	BC-No.:	17-1559
Package:	N/A	Language:	Turkish		
Size:	297 x 210 mm	Weight:	N/A		
Printing colours:	1. Pan 280 2. Pan Process Cyan	Braille transcrip.:	N/A		
Font size:	9,5 pt	Group:	N/A	RUT:	N/A
Add. Info:	N/A	Date:	31.08.18	RD-Code:	N/A
Kamenir					
Approved for printing:					